

DR.in Antigen test Kit

(**User App**)

แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานตรวจ Rapid Test สำหรับตรวจด้วยตนเอง

1. การเข้าใช้งาน Application DR.in

เงื่อนไข และข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน แอปพลิเคชัน DR.in

การเข้าแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ("ผู้ใช้งาน") ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เอิร์ล คอมพานี จำกัด ("เอิร์ล คอมพานี") กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันนี้ทั้งหมด ("ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้") โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในแอปพลิเคชันนี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมี

ยอมรับเงื่อนไข

ยอมรับ

เงื่อนไข และข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน แอปพลิเคชัน DR.in

การเข้าแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ("ผู้ใช้งาน") ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เอิร์ล คอมพานี จำกัด ("เอิร์ล คอมพานี") กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันนี้ทั้งหมด ("ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้") โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในแอปพลิเคชันนี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมี

ยอมรับเงื่อนไข

ยอมรับ

เมื่ออ่านเงื่อนไข และข้อตกลงการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว กดยอมรับเพื่อเข้าใช้งาน Application DR.in

เมื่อเปิดหน้าเข้าใช้งาน Application DR.in จะมีเงื่อนไข และข้อตกลงการใช้บริการทั้งหมด 9 ข้อ เพื่อให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจก่อนเข้าใช้งาน

กดยอมรับเงื่อนไขเพื่อเข้าใช้งาน Application DR.in

2. การ Login ใช้งาน Application DR.in

ยินดีต้อนรับสู่ DR.in
กรุณกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้งาน

เบอร์โทรศัพท์ *

+66 0817779999

เข้าสู่ระบบ

กรอกเบอร์โทรศัพท์
เพื่อ Login ใช้งาน

กด เข้าสู่ระบบ

ระบุรหัสยืนยันตัวตน

รหัสยืนยันตัวตน จะแจ้งเตือนไปที่เบอร์โทรศัพท์ +6681xxx9999

รหัสยืนยันตัวตน *

แจ้งเตือน

รหัส OTP ของคุณคือ 357469 จะหมดอายุภายใน 3 นาที

รับทราบ

ยืนยัน

เมื่อกรอกเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว จะมี OTP เพื่อให้ยืนยันตัวตนในการใช้งาน ดังรูป

ระบุรหัสยืนยันตัวตน

รหัสยืนยันตัวตน จะแจ้งเตือนไปที่เบอร์โทรศัพท์ +6681xxx9999

รหัสยืนยันตัวตน *

3 5 7 4 6 9

ขอ OTP ได้ใช้ครั้งใหม่ 02 : 48 วินาที

ยืนยัน


กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
เพื่อยืนยันการเข้าใช้งาน

กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการเข้าใช้งาน


กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP ในการใช้งาน



กรอก OTP เรียบร้อยแล้ว ให้กดยืนยัน
เพื่อเข้าใช้งาน Application DR.in

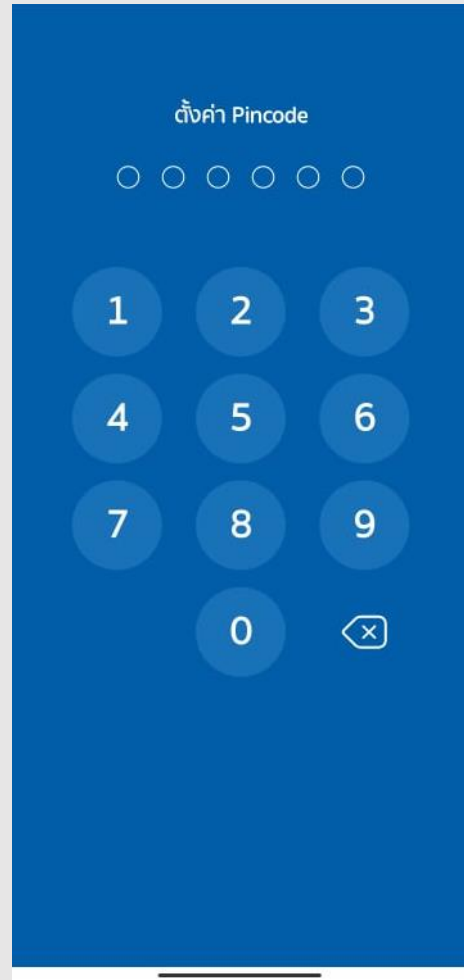

ตั้งค่า Pincode ระบุรหัส 6 ตัว
สำหรับการเข้าใช้งานในครั้งต่อไป

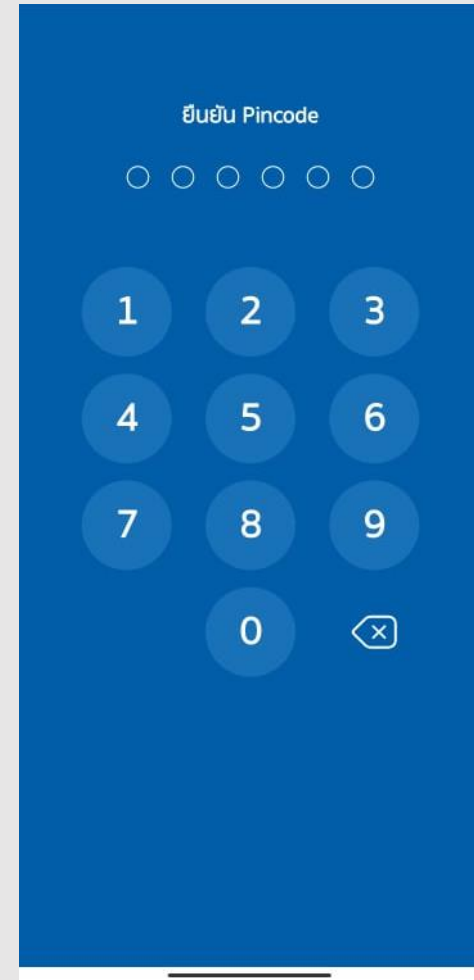

ยืนยัน Pincode ให้ตรงตามที่ระบุไปในครั้งก่อน
เพื่อเป็นการยืนยัน Pincode

3. หน้าแรก Application DR.in





หน้าแรกจะแสดง การลงทะเบียนผู้ใช้งาน, การเริ่มตรวจ Rapid Test, เกี่ยวกับ Antigen Test Kit และรวมไปถึงมุมมองความรู้

3.1 หน้าลงทะเบียนผู้ใช้งาน



ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

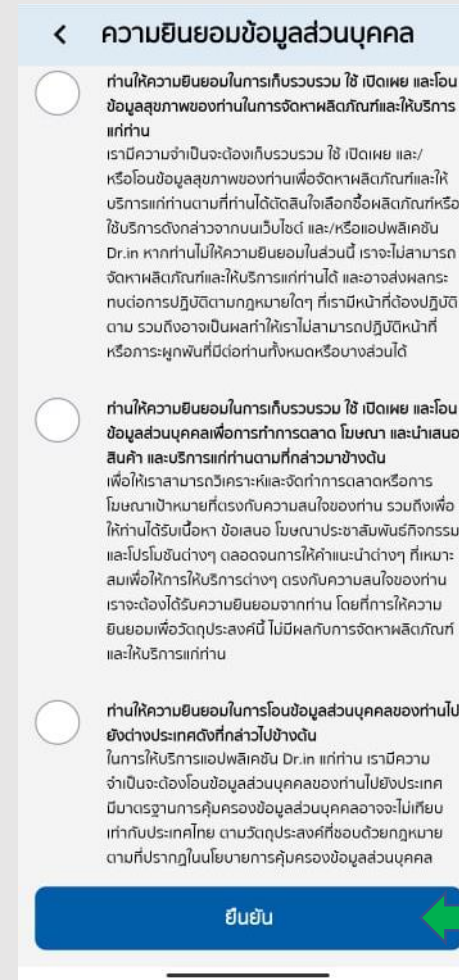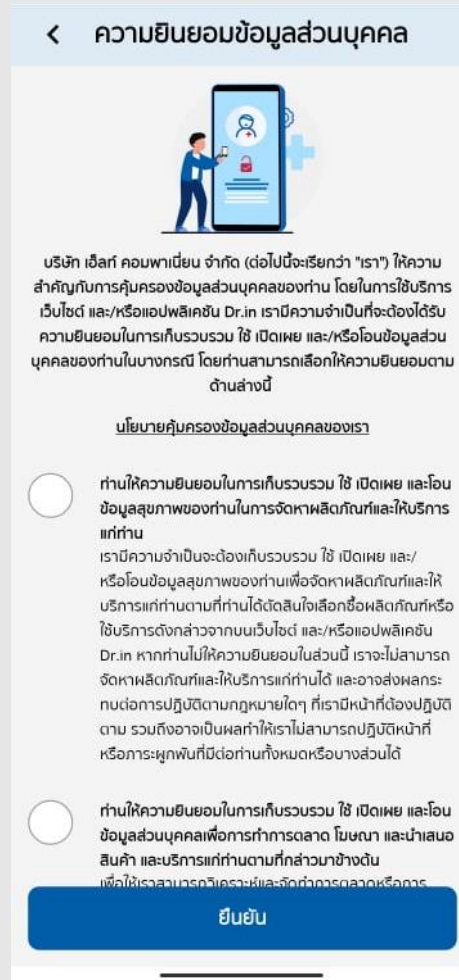

กดยืนยัน เพื่อไปที่หน้าลงทะเบียน

กดปุ่มลงทะเบียนเพื่อ ลงทะเบียนผู้ใช้งาน สำหรับใช้ตรวจ Rapid Test

เมื่อกดลงทะเบียน จะแสดงหน้าความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี โดยสามารถเลือกให้ความยินยอมได้ ตามรูปภาพ

ลงทะเบียน

ชื่อ *
นางสาว ▾ กรุณากรอกชื่อ

นามสกุล *
กรุณากรอกนามสกุล

หมายเลขบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต *
กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต

วัน/เดือน/ปีเกิด *
11 สิงหาคม 2564 ▾

หมายเลขโทรศัพท์ *
0817779999

ถ่ายรูปบัตรประชาชน *

ยืนยัน

กรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียน

1. คำนำหน้า
2. ชื่อจริง
3. นามสกุล
4. หมายเลขบัตรประชาชน/ รหัส passport
5. วัน/เดือน/ปีเกิด
6. หมายเลขโทรศัพท์
7. ถ่ายรูปบัตรประชาชน
8. ถ่ายรูปภาพคู่บัตรประชาชน

กรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ชื่อ *
นางสาว ▾ แข็งแรง

นามสกุล *
ปลอดภัยจากโควิด

หมายเลขบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต *
1101099999999

วัน/เดือน/ปีเกิด *
11 สิงหาคม 2541 ▾

หมายเลขโทรศัพท์ *
0817779999

ถ่ายรูปบัตรประชาชน *

ยืนยัน

เมื่อกรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กดยืนยันเพื่อบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน

ลงทะเบียน

วัน/เดือน/ปีเกิด *
11 สิงหาคม 2541 ▾

หมายเลขโทรศัพท์ *
0817779999

ถ่ายรูปบัตรประชาชน *

ถ่ายรูปภาพคู่บัตรประชาชน *

ยืนยัน

กดยืนยัน
เพื่อยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน

3.2 เริ่มการตรวจ Rapid Test



กดเริ่มการตรวจ Rapid Test

กดเริ่มการตรวจ Rapid Test เพื่อตรวจ



ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการตรวจได้ 2 รูปแบบ

ตรวจด้วยตนเอง

ตรวจโดย Tester ผู้ตรวจที่ผ่านการอบรม



1. ตรวจด้วยตนเอง




2. สร้าง QR ให้ Tester ทำการตรวจ

3.2.1 เริ่มการตรวจ Rapid Test (ตรวจด้วยตนเอง)



ตรวจด้วยตัวเอง

เลือกวิธีการตรวจ Rapid Test ตรวจด้วยตัวเอง

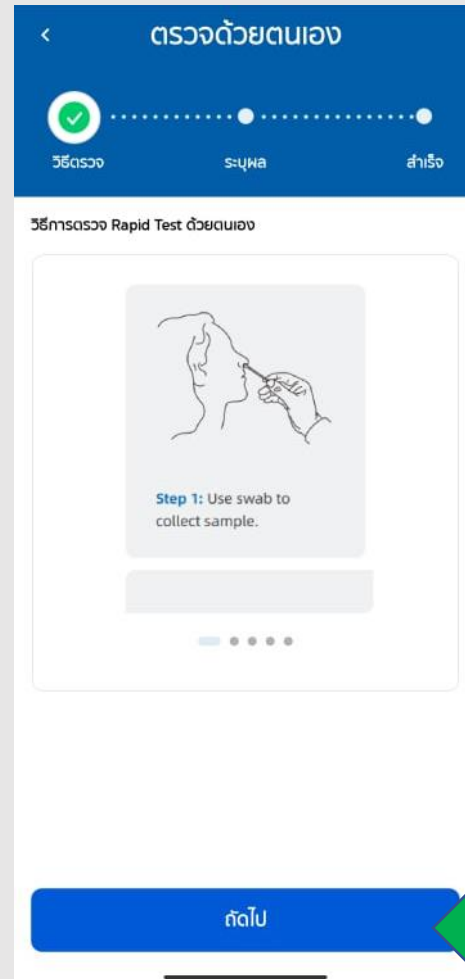

กดถัดไป

แสดงวิธีการตรวจเป็นรูปภาพ เพื่ออธิบายการใช้งาน Rapid Test



Scan QR Code เพื่อระบุผลการตรวจ

ตรวจด้วยตนเอง (กรณีพบเชื้อ)



ระบุผลการตรวจ

รูปภาพผลการตรวจ


แสดงรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้
ระบุผลการตรวจว่าติด/ไม่ติด หรือไม่สามารถตรวจได้
รวมถึงแนบรูปภาพผลการตรวจเข้าระบบ



กดเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกผล

เมื่อระบุผลการตรวจเรียบร้อยแล้ว
กดยืนยันเพื่อเก็บผล

กรณีพบเชื้อ สนใจนัดตรวจแบบ RT-PCR

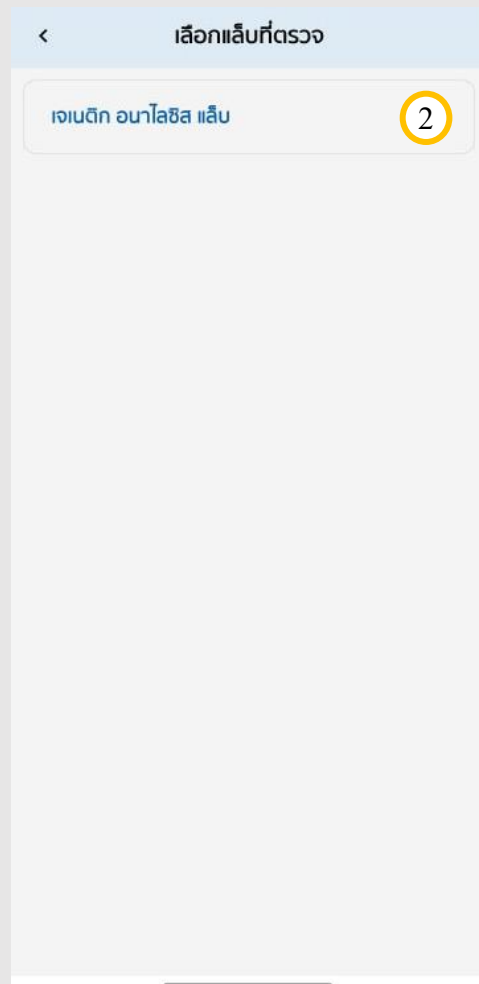

กดเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกผล

กรณีที่พบเชื้อจะแสดงข้อมูลช่องทางให้สามารถนัดหมายตรวจด้วย RT-PCR เพื่อทำการตรวจอีกครั้ง

(1) กด เลือกนัดตรวจ

(2) เลือกแล็บที่ต้องการตรวจ RT-PCR

กรณีพบเชื้อ ไม่สนใจนัดตรวจแบบ RT-PCR

ตรวจด้วยตนเอง

✓ 5 ขั้นตอน ✓ ระบุผล ✓ สำเร็จ

ผลการตรวจของคุณ คอ พบว่าติดเชื้อ (Positive)

รูปถ่ายผลการตรวจ

ขอการนัดหมายการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ของ นางเชิงแรง ปลอดภัยจากโควิด

สนใจนัดตรวจแบบ RT-PCR จะมีเจ้าหน้าที่โทรหาคุณภายใน 1 วัน

ไม่สนใจ

เสร็จสิ้น

ตรวจด้วยตนเอง

✓ 5 ขั้นตอน ✓ ระบุผล ✓ สำเร็จ

ผลการตรวจของคุณ คอ พบว่าติดเชื้อ (Positive)

รูปถ่ายผลการตรวจ

ขอการนัดหมายการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ของ นางเชิงแรง ปลอดภัยจากโควิด

สนใจนัดตรวจแบบ RT-PCR จะมีเจ้าหน้าที่โทรหาคุณภายใน 1 วัน

ไม่สนใจ

เสร็จสิ้น

กดเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกผล

กรณีที่พบเชื้อจะแสดงข้อมูลช่องทางให้สามารถนัดหมายตรวจด้วย RT-PCR เพื่อทำการตรวจอีกครั้ง หากไม่สนใจสามารถเลือกกดที่ไม่สนใจได้


ตรวจด้วยตนเอง (กรณีไม่พบเชื้อ)



ระบุผลการตรวจ

รูปภาพผลการตรวจ

แสดงรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้
ระบุผลการตรวจว่าติด/ไม่ติด หรือไม่สามารถตรวจได้
รวมถึงแนบรูปภาพผลการตรวจเข้าระบบ

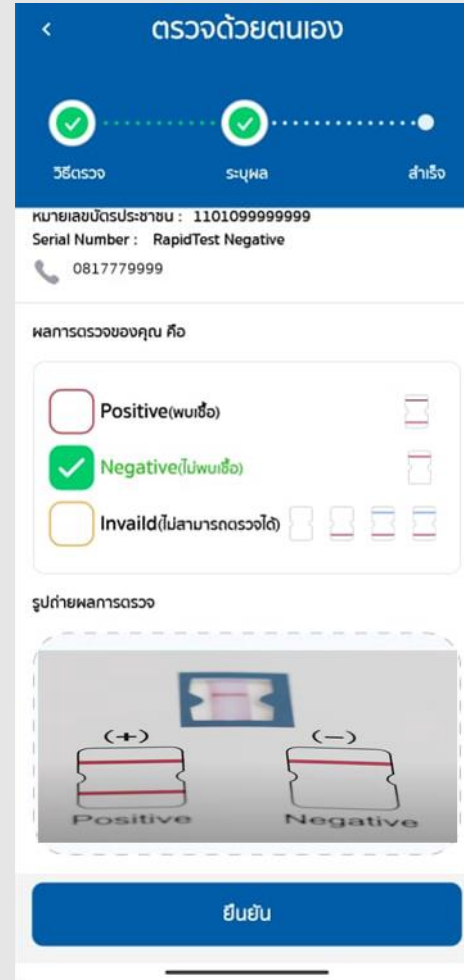

เมื่อระบุผลการตรวจเรียบร้อยแล้ว
กดยืนยันเพื่อเก็บผล



กดเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกผล

กดเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกผล

ตรวจด้วยตนเอง (กรณีไม่สามารถระบุผลได้)



ระบุผลการตรวจ

รูปภาพผลการตรวจ

แสดงรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้
ระบุผลการตรวจว่าติด/ไม่ติด หรือไม่สามารถตรวจได้
รวมถึงแนบรูปภาพผลการตรวจเข้าระบบ



เมื่อระบุผลการตรวจเรียบร้อยแล้ว
กดยืนยันเพื่อเก็บผล



กดเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกผล

กดเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกผล


3.3 เกี่ยวกับ Antigen Test Kit



แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ Antigen Test Kit
สถานที่ขาย และสถานที่ตรวจ



สถานที่ขาย

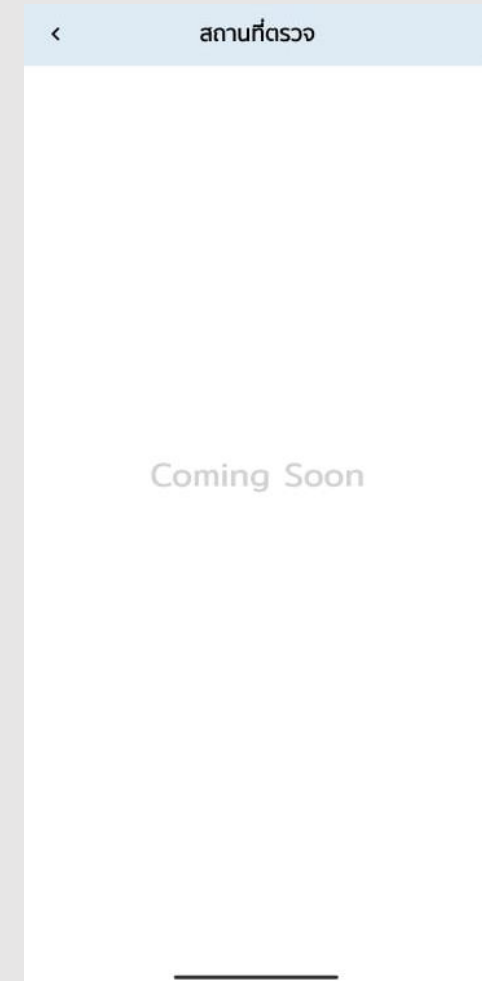

สถานที่ตรวจ

3.4 มุมความรู้ (วิธีการใช้ชุดตรวจ)



มุมความรู้



แสดงรายละเอียดความรู้
วิธีการใช้ชุดตรวจ และ วิธีการใช้แอฟ กับชุดตรวจ ATK

วิธีการใช้ชุดตรวจ


3.4 มุมความรู้ (วิธีการใช้แอป กับชุดตรวจ ATK)



แสดงรายละเอียดความรู้
วิธีการใช้ชุดตรวจ และ วิธีการใช้แอป กับชุดตรวจ ATK



วิธีการใช้แอป กับชุดตรวจ ATK

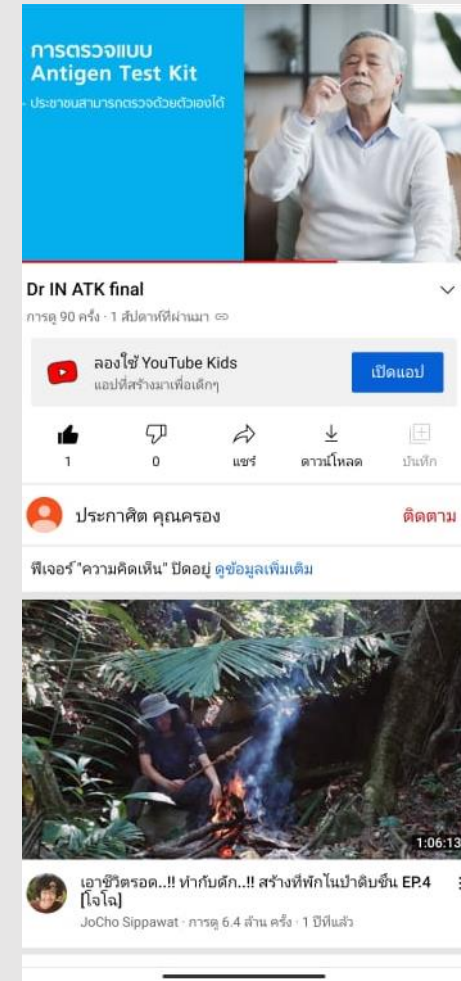

4. ตรวจสอบผล




แสดงรายละเอียดผลตรวจในแต่ละครั้ง




ประวัติการตรวจผลแต่ละครั้ง จะแสดงข้อมูล และรายละเอียดของผลการตรวจ


5. ตั้งค่า

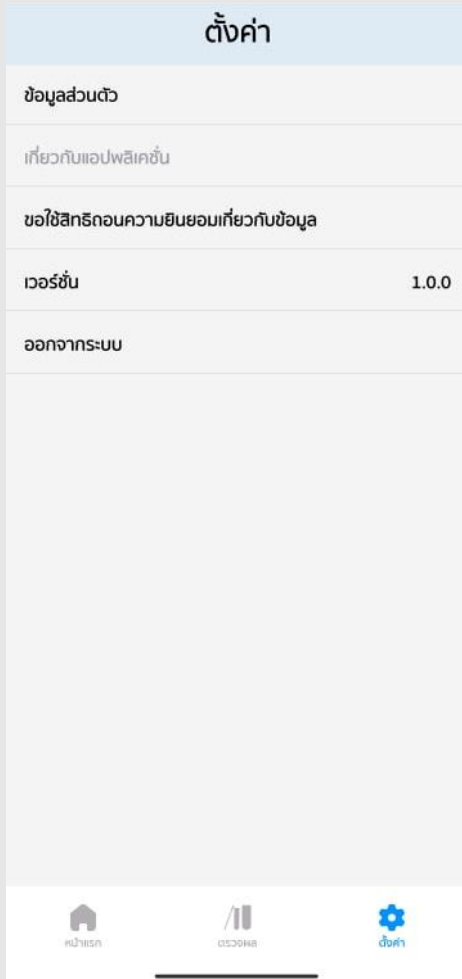


แสดงรายละเอียดตั้งค่า

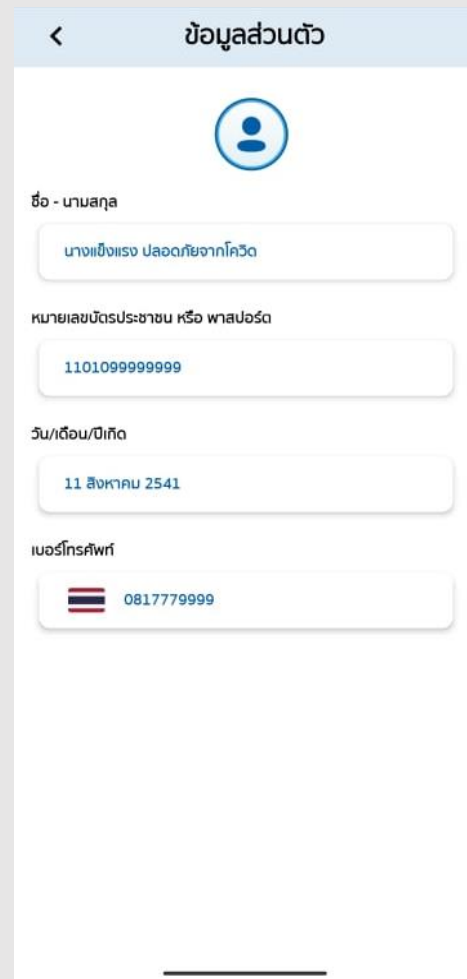

ข้อมูลส่วนตัว
แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

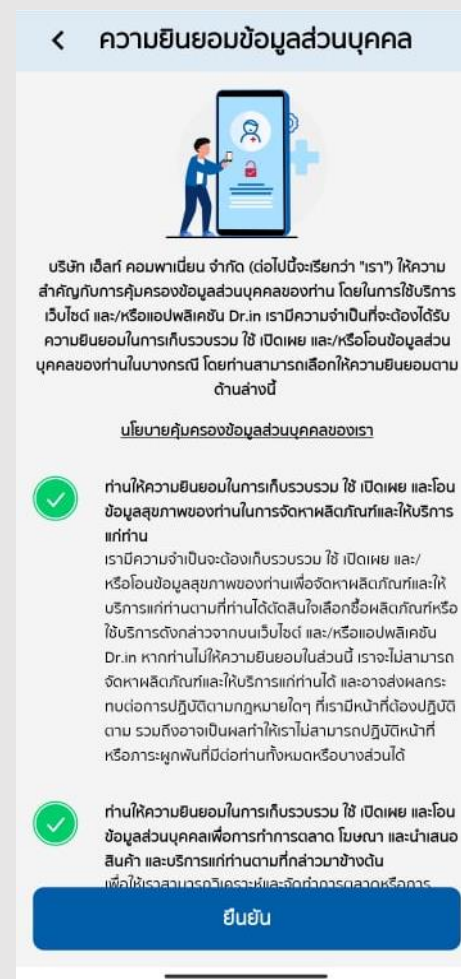

แสดงหน้าความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี โดยสามารถเลือกให้ความยินยอม และสามารถเปลี่ยนแปลงได้

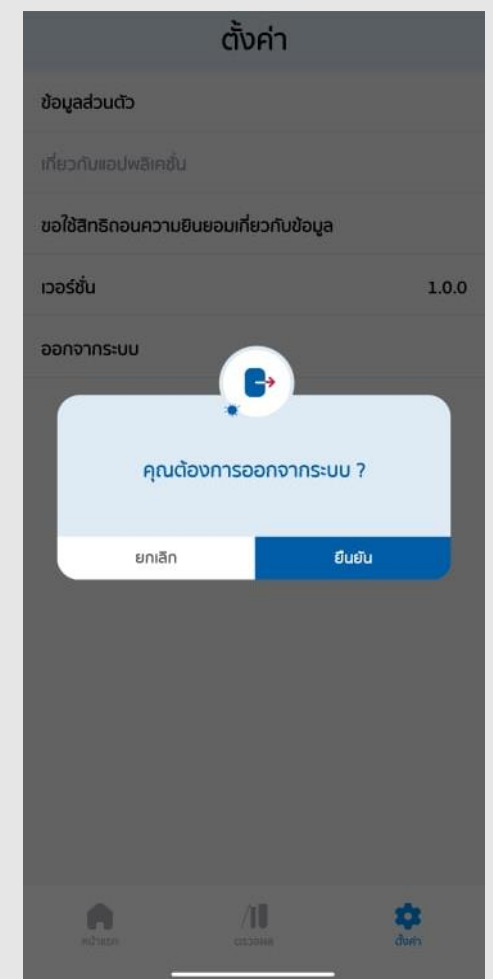

หากต้องการออกจากระบบสามารถกดยืนยันเพื่อออกจากระบบได้ และสามารถกดยกเลิกเพื่อกลับมาใช้งานต่อไป